

Windows11 ご使用の方 通信ポートの設定

TAS9VIEW<RW>令和バージョンご使用の場合


【2022年3月31日以前ご購入の方が対象】

■ windows11 または windows10 を windows11 にアップグレードしたパソコンに TAS9VIEW<RW> プログラムをインストール後、下記の方法で通信の設定を行ってください

■ **全ての USB ポートで設定をしておく**と、どの USB ポートを使用しても通信ができるようになります。USB ポートを変更することがある場合は全ての USB ポートで設定をすることをおすすめします。
※USB ケーブルを設定する USB ポートに差し替えながら各々設定を行ってください。

■ TAS9VIEW<RW> 「**プログラムバージョン 1.1.8 以降**」をご使用の方は 3 ページ **step2** へ

※プログラムバージョンは
インストール DVD の表面または
プログラム画面の下部に表示されています。

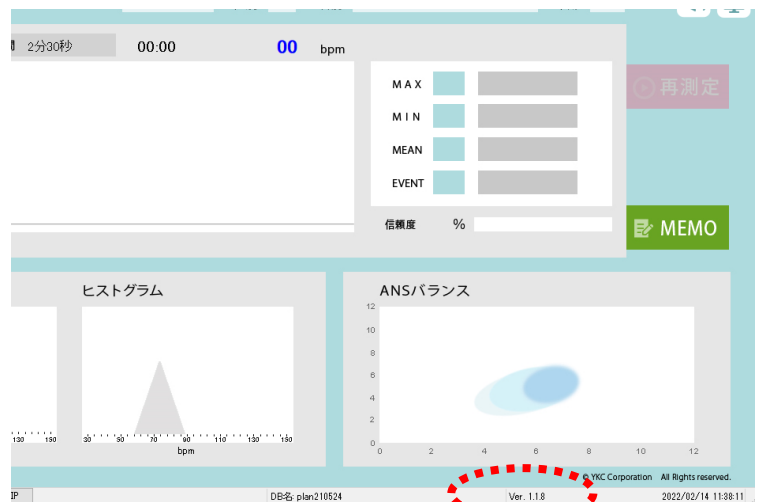

step1 プログラムをアップデートします。


■ **インターネットに接続している状態**、本体とパソコンは接続した状態で行ってください。
また、TAS9VIEW<RW>本体の電源を入れてください。

① プログラムを立ち上げ
環境設定画面へ移動します。


② 「プログラムアップデート」ボタンを
クリックします。




- ③ 「tas9view」と入力します。
※半角小文字

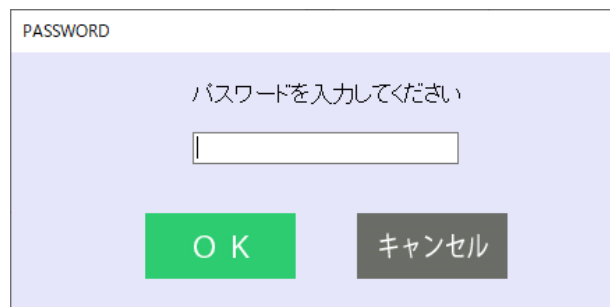


- ④ 「はい」をクリックします。
クリックするとプログラムが終了し、
新しいプログラムのアップデートが始まります。

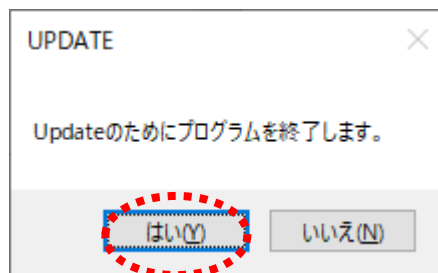


- ⑤ 「Next」をクリックします。

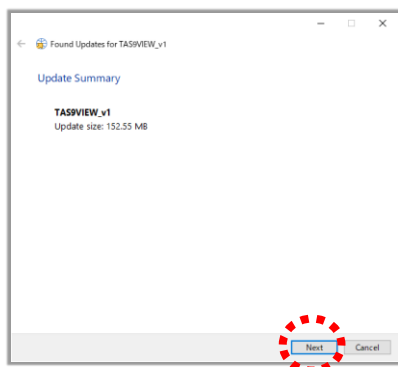


- ⑥ アップデートが始まります。

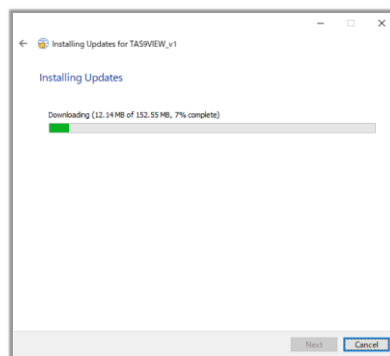


- ⑦ 「Next」とクリックします。

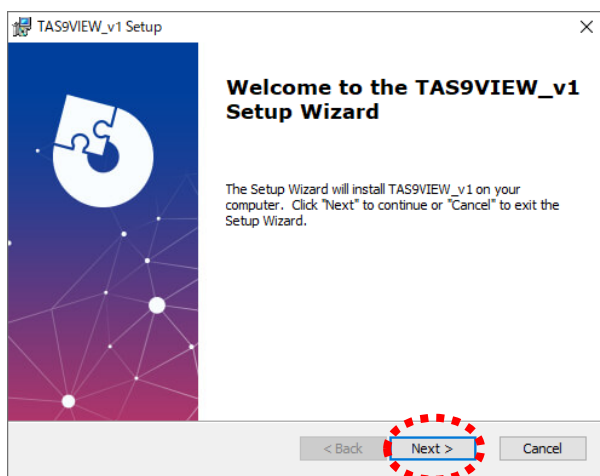


- ⑧ 「Next」とクリックします。

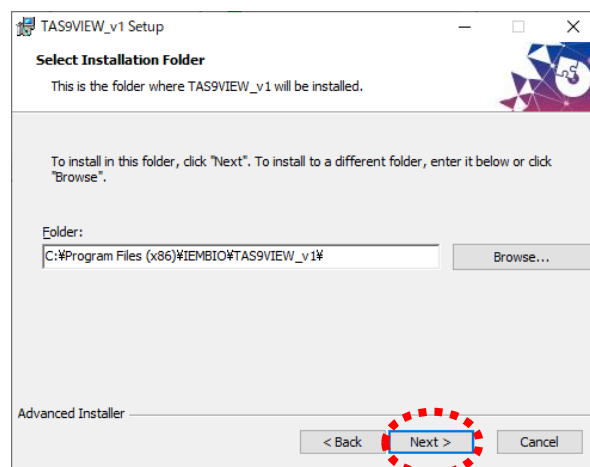


⑨ 「Install」とクリックします。

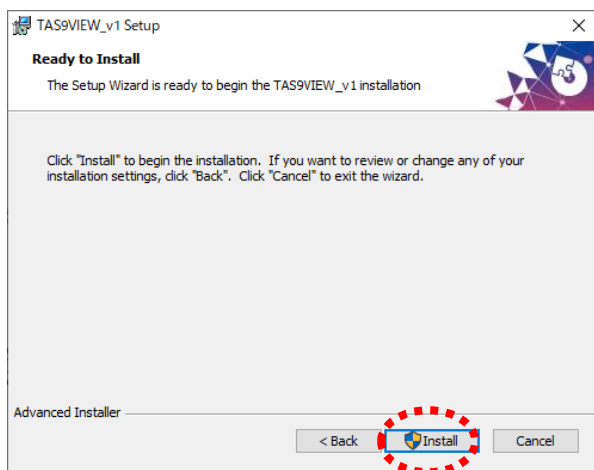

⑩ 「はい」とクリックします。

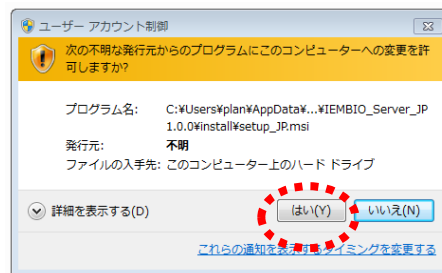

⑪ 「Finish」をクリックします。
プログラムアップデートの終了です。

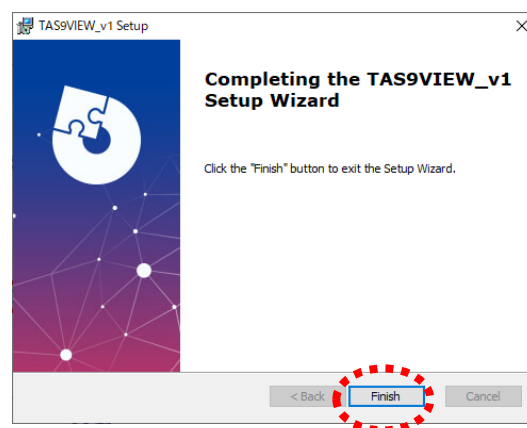


step2

既にインストールされている通信ドライバーをアンインストールし、
新しい通信ドライバーをプログラムからインストールします


① 画面下のタスクバーの  を押して検索画面を開きます。

「コントロールパネル」と入力し、コントロールパネルを開きます。


「プログラムのアンインストール」をクリックします。

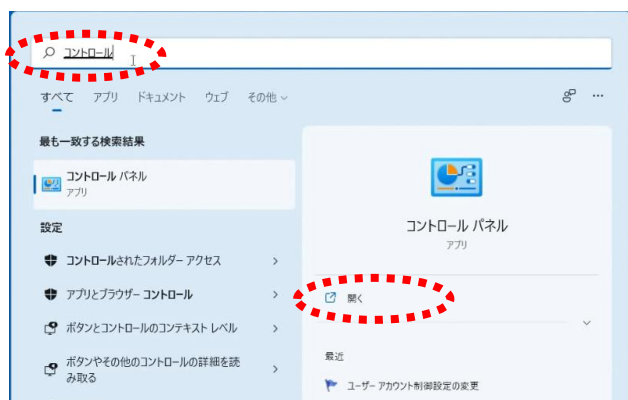


- ② 「PL-2303 USB-to-serial」を
右クリックし、「アンインストール」を
クリックします。

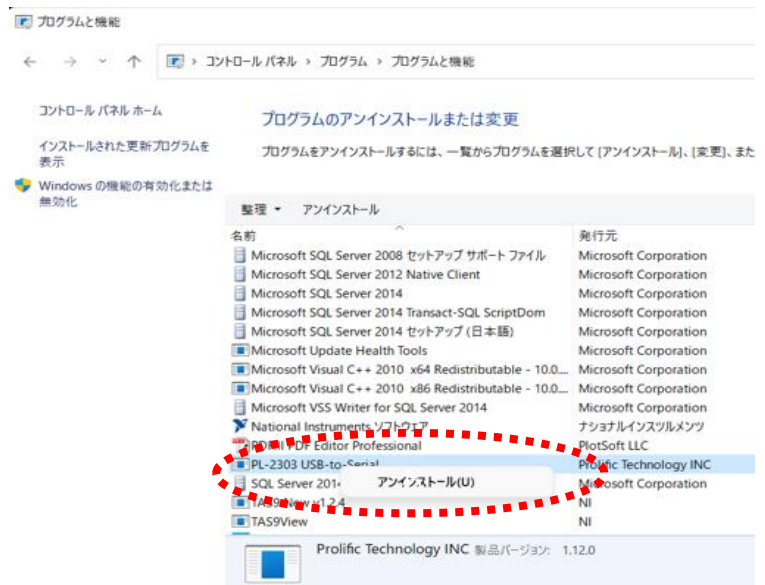


- ③ 右記のメッセージが表示されれば場合は「はい」を
クリックします。

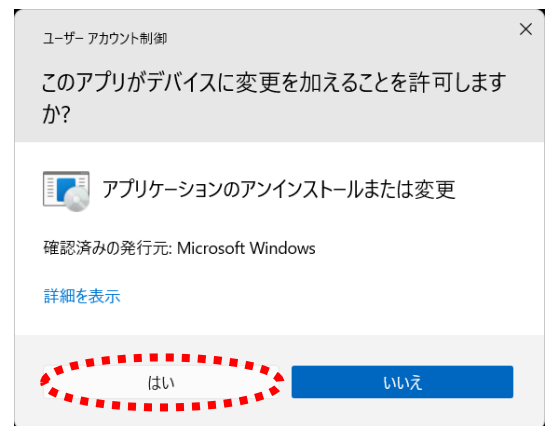


- ④ 「削除」を選択し、「次へ」を
クリックします。

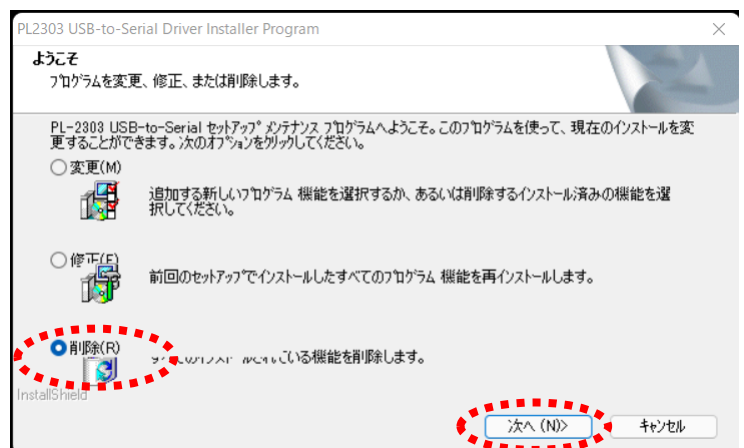

- ⑤ 「はい」をクリックします。

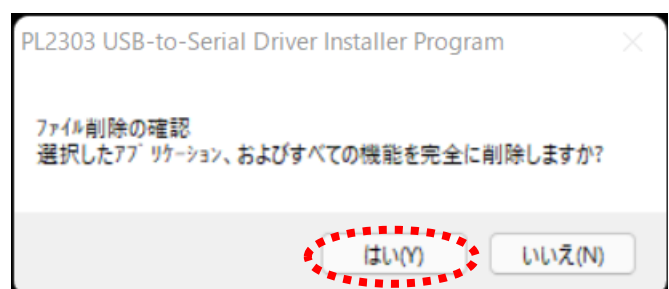

- ⑥ アンインストールが完了しました。
「完了」をクリックします。

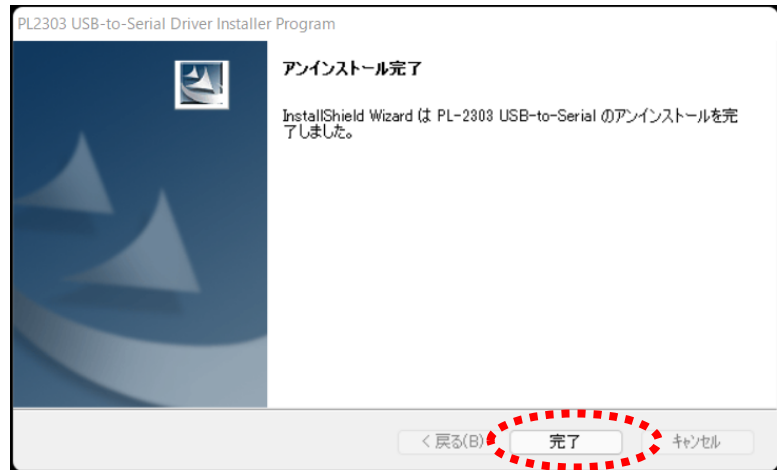

<プログラムバージョン 1.1.8 をご使用の方はここから>

- ⑦ TAS 9 VIEW<RW>のプログラムを開きます。
測定画面へ進み「測定開始」ボタンをクリックします。
※既にこの設定を行っている場合は
6 ページ「step3」⑫へ




- ⑧ 「測定開始」ボタンをクリックすると
右記のメッセージが表示されます。
「はい」をクリックします。




- ⑨ 右記のメッセージが表示された場合は
「はい」をクリックします。



- ⑩ 「Next」 をクリックします。

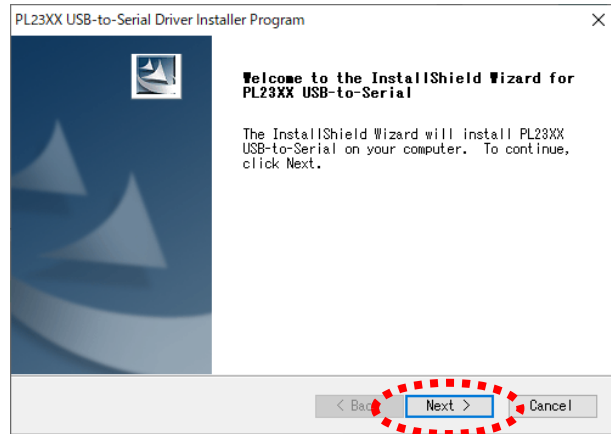


- ⑪ USB 通信ドライバーのインストールが
できました。
「Finish」 をクリックします。

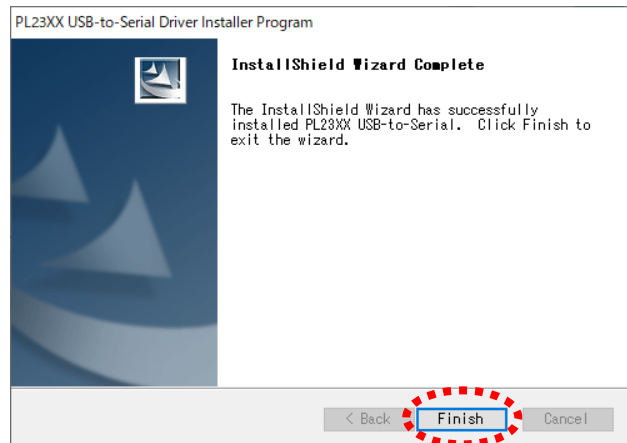

※ ここで本体をつなぎ、測定を行ってください。正常に測定できれば作業は終了です。

もし、測定できない場合は、下記の **step3** へ進んでください。

step3 通信ドライバーを Windows11 で使用できるように更新します。


- ⑫ タスクバーの  を押して検索画面を開きます。




- ⑬ 検索画面で
「デバイスマネージャー」
を検索します。
検索結果から
デバイスマネージャーを
開きます。




- ⑭ デバイスマネージャー画面の 「ポート (COM と LPT)」 の横にある 「>」 クリックします。
「Please install corresponding PL2303 driver to support Windows11 and further OS」 の上で
右クリックし、「ドライバーの更新」 をクリックします。

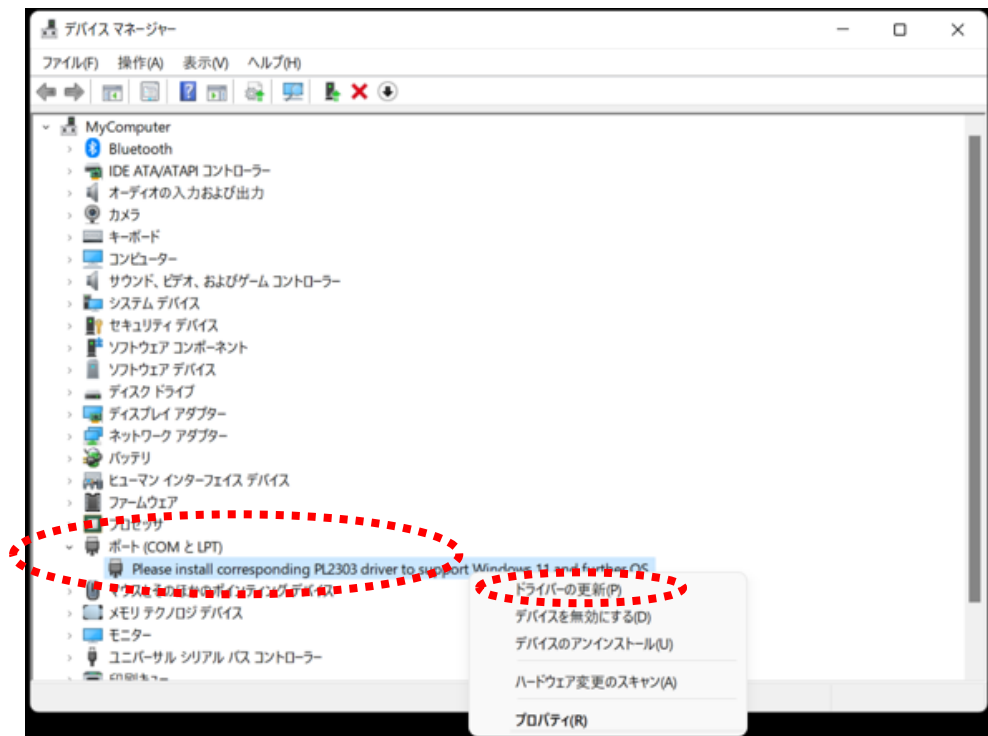


- ⑮ 「コンピューターを参照してドライバーを検索」
をクリックします。

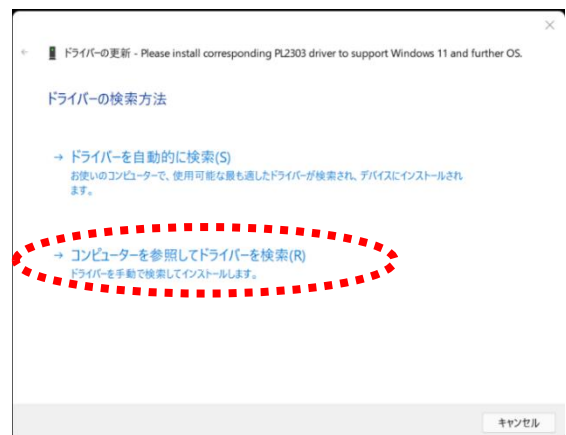

- ⑯ 「コンピューターを利用可能なドライバーの一覧
から選択します」 をクリックします。

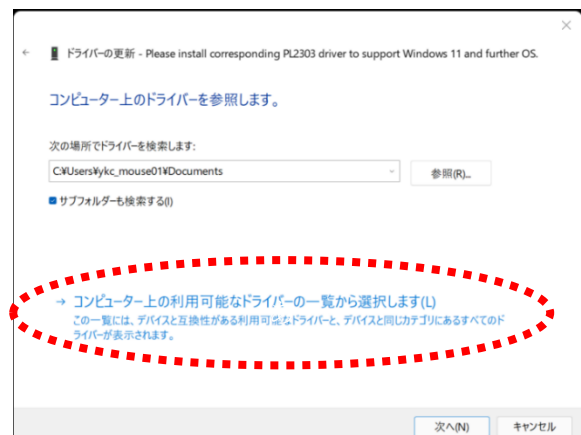

- ⑰ 互換性のあるハードウェア
「Prolific USB to Serial
Comm Port バージョン
: 3.9.1.0[2021/08/11]」を
クリックし、「次へ」を
クリックします。

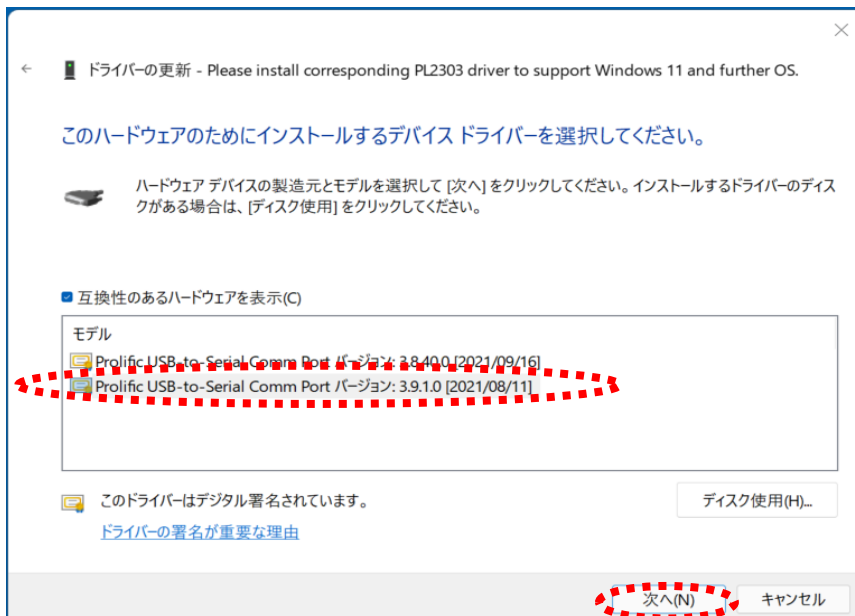

- ⑱ ドライバーが更新されたら
「閉じる」をクリックします。



- ⑲ デバイスマネージャーの画面を閉じます。

- ⑳ TAS9VIEW<RW>のプログラムを開き、測定ができればここで設定は完了です。

※ 注意

- ・ USB ポートを変更することがある場合は全ての USB ポートで設定をすることをおすすめします。
- ・ 全ての USB ポートで設定をしておくとの USB ポートでも測定が可能になります。
- ・ USB ケーブルを設定する USB ポートに差し替えながら各々「step3」以降の設定を行ってください。